

Clearblue® PLUS

cu VÂRF CARE ÎȘI SCHIMBĂ CULOAREA

- Clearblue® PLUS garantează o exactitate de peste 99%, din ziua în care este așteptată menstruația
 - Clearblue® PLUS poate fi utilizat cu 5 zile înainte de menstruația ratată
- Citiți această broșură cu atenție înainte de efectuarea unui test.**

Test de sarcină

Înainte de a începe

Un ceas vă poate fi de ajutor în timpul testului.

1 EFECTUAREA TESTULUI

Dacă efectuați testul începând cu ziua în care este așteptată menstruația, puteți utiliza testul la orice oră.

Dacă efectuați testul înainte de ziua în care este așteptată menstruația, utilizați prima urină din ziua respectivă.

Când sunteți pregătiți să efectuați testul, scoateți bețisorul de test din folie și îndepărtați capacul albastru. Utilizați bețisorul de test imediat.

TESTAȚI UTILIZÂND URINA

Puteți efectua testul direct în jetul de urină sau într-o mostră de urină colectată într-un recipient curat și uscat.

- Țineți vârful care își schimbă culoarea îndreptat în jos în

Capac Vârf care își schimbă culoarea



jetul de urină sau în mostra de urină colectată, după cum se arată, timp de **5 secunde**.

- Vârful care își schimbă culoarea va deveni rapid roz, indicând faptul că urina este absorbită. **Trebuie să continuați să țineți vârful care își schimbă culoarea în urină pe tot parcursul celor 5 secunde.**



Trebuie să continuați să țineți vârful care își schimbă culoarea în urină pe tot parcursul celor 5 secunde.

5 secunde

Începeți cronometrarea celor 5 secunde de îndată ce observați că vârful care își schimbă culoarea devine roz.

Jet de urină SAU Mostră colectată

- Țineți vârful care își schimbă culoarea îndreptat în jos sau așezați bețisorul de test pe o suprafață plană până când se afișează o linie albastră în fereastra de control.
- Vă recomandăm să puneți la loc capacul.

Consultați **întrebarea 7** dacă vârful care își schimbă culoarea nu a devenit complet roz.

3 minute

ÂȘTEPTAȚI 3 MINUTE.

Pe măsură ce testul începe să funcționeze, veți vedea linia albastră sau liniile albastre începând să apară.

3 CITIȚI REZULTATUL


Puteți citi rezultatul în fereastra de rezultate.

Când citiți rezultatul, în fereastra de control trebuie să fie afișată o linie albastră. Această linie indică faptul că testul a funcționat.

Un rezultat „Însărcinată” poate apărea în decurs de 1 minut, dacă efectuați testul începând cu ziua în care considerați menstruația ca fiind ratată (prima zi după ziua în care era așteptată menstruația și aceasta nu a început). Trebuie să așteptați cele 3 minute pentru a confirma un rezultat „Nu sunteți însărcinată” sau când efectuați testul înainte de a confirma întârzierea menstruației (consultați **întrebarea 10**).

Dacă nu apare nicio linie albastră în fereastra de control în decurs de **10 minute**, testul nu a funcționat (consultați **întrebarea 7**).

Fereastră de rezultate Fereastră de control

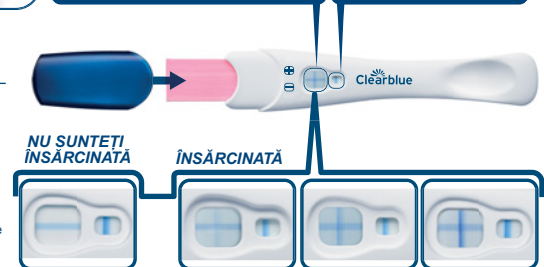

Dacă rezultatul este „Nu sunteți însărcinată”, consultați **întrebarea 12** din secțiunea de Întrebări și răspunsuri.

Dacă rezultatul este „Însărcinată”, consultați **întrebarea 13** din secțiunea de Întrebări și răspunsuri.

Nu contează dacă una dintre liniile din simbolul „+” este mai deschisă sau mai închisă decât cealaltă, rezultatul este „Însărcinată”.

IMPORTANT!

Citiți rezultatele în decurs de **10 minute** de la efectuarea unui test. Nu luați în seamă modificările apărute în rezultat după această perioadă.

Dacă nu sunteți sigură de rezultat, consultați **întrebarea 8** pentru detalii complete.

Întrebări și răspunsuri – Parcurgeți secțiunea de mai jos, ce răspunde celor mai frecvente întrebări.

Întrebări și răspunsuri

1 Ce exactitate are Clearblue® PLUS?

Clearblue® PLUS garantează o exactitate de peste 99% în testele de laborator, utilizat începând cu ziua în care este așteptată menstruația.

2 Cum funcționează Clearblue® PLUS?

Când sunteți însărcinată, corpul dumneavoastră produce hormonul hCG (gonadotropină corionică umană). Cantitatea de hCG din corpul dumneavoastră crește în primele etape ale sarcinii. Clearblue® PLUS poate detecta cantități infime din acest hormon în urina dumneavoastră (sensibilitatea acestui test este de 25 mIU/ml).

3 Când pot utiliza testul Clearblue® PLUS?

Clearblue® PLUS poate fi utilizat cu până la 5 zile înainte de menstruația ratată (și anume, cu 4 zile înainte de ziua în care este așteptată menstruația). Dacă efectuați testul înainte de ziua în care este așteptată menstruația și obțineți rezultatul „Nu sunteți însărcinată”, există totuși posibilitatea să fiți însărcinată. Consultați graficul de mai jos pentru informații privind rezultatele din testele clinice cu testul de sarcină Clearblue® PLUS care au utilizat mostre din stadiile incipiente ale sarcinii.

Testare anticipată	
Număr de zile înainte de ziua în care este așteptată menstruația	% de mostre de la femei însărcinate care prezintă rezultatul „Însărcinată”
-1	98%
-2	97%
-3	88%
-4	56%

4 Trebuie să utilizez o mostră de urină de dimineața devreme?

Dacă efectuați testul înainte de ziua în care este așteptată menstruația, vă recomandăm să utilizați prima urină a zilei. În caz contrar, puteți efectua testul la orice oră. Evitați consumarea de lichide în exces înainte de efectuarea testului.

5 Nu știu sigur când trebuie să încep menstruația. De unde știu când este momentul corect pentru efectuarea testului?

- Pentru a stabili ziua în care este așteptată menstruația, calculați durata obișnuită a ciclului menstrual, numărând de la prima zi a menstruației până la ziua de dinaintea următoarei menstruații.
- Dacă aveți cicluri menstruale neregulate, permiteți trecerea celei mai lungi perioade de ciclu menstrual din lunile recente înainte de a efectua testul.
- Dacă nu știți când este ziua în care este așteptată menstruația, vă recomandăm să nu efectuați testul la mai puțin de 19 zile de la ultimul contact sexual neprotajat.
- Dacă rezultatul este „Nu sunteți însărcinată” și suspectați existența unei sarcini, consultați **întrebarea 13**.

6 Există medicamente sau probleme medicale ce pot afecta rezultatul?

- Citiți întotdeauna instrucțiunile producătorului medicamentului pe care îl luați înainte de efectuarea unui test.
- Tratamentele pentru fertilitate care conțin hCG pot conduce la rezultate incorecte (de obicei, aceste tratamente pentru fertilitate sunt administrate prin injecție și efectuarea testului prea devreme după administrare poate conduce la un rezultat „Însărcinată” incorect).
- Alte tratamente pentru fertilitate (cum ar fi clomifen citrat), analgezicele și contraceptivul pe bază de hormoni (de exemplu, pilula contraceptivă) nu ar trebui să afecțeze rezultatul.
- Dacă ați întrerupt de curând contraceptivele pe bază de hormoni sau utilizați tratamente pentru fertilitate, precum clomifen citrat, este posibil ca ciclul menstrual să fie neregulat, ceea ce poate conduce la testarea prea timpurie.
- Dacă ați fost însărcinată recent (chiar dacă nu ați dus sarcina la termen), este posibil să obțineți un rezultat „Însărcinată” incorect.
- Sarcina extraterină, chisturile ovariene, menopauza și unele probleme medicale foarte rare pot conduce la rezultate incorecte.

- Dacă obțineți un rezultat „Însărcinată”, este posibil ca ulterior să aflați că nu sunteți însărcinată, ca urmare a pierderii naturale a sarcinii, situație ce poate apărea în stadiile incipiente.

Dacă obțineți rezultate neașteptate, ar trebui să le discutați cu doctorul dumneavoastră.

7 Am folosit testul de sarcină, dar vârful care își schimbă culoarea nu a devenit complet roz. Cum ar trebui să procedez?

Dacă vârful care își schimbă culoarea nu a devenit complet roz, este posibil să nu fi aplicat suficient urină. Cu toate acestea, dacă linia albastră apare în fereastra de control în decurs de 10 minute de la efectuarea testului, atunci testul a funcționat. Dacă nu apare nicio linie albastră în fereastra de control în decurs de 10 minute de la efectuarea testului, consultați **întrebarea 8**.

8 Am utilizat testul de sarcină, dar nu a apărut nicio linie albastră în fereastra de control. Cum ar trebui să procedez?

Dacă nu apare nicio linie albastră în fereastra de control în decurs de 10 minute de la efectuarea testului, atunci testul nu a funcționat. Acest lucru se poate întâmpla dacă:

- Vârful care își schimbă culoarea nu a fost ținut îndreptat în jos sau bețisorul de test nu a fost așezat pe o suprafață plană după aplicarea urinei.
- A fost utilizată prea multă sau prea puțină urină. Trebuie să țineți bețisorul în contact cu urina timp de 5 secunde.

 Trebuie să testați din nou, utilizând un test nou și având grijă să respectați instrucțiunile. Vă recomandăm să colectați o mostră de urină într-un recipient curat și uscat și să scufundați doar vârful care își schimbă culoarea în urină, timp de 5 secunde.

9 Cum ar trebui să procedez dacă nu sunt sigură de rezultat?

- Pentru ca rezultatul testului să fie „Însărcinată”, în decurs de 10 minute de la efectuarea testului, în fereastra de control trebuie să apară o linie albastră, iar în fereastra de rezultate, simbolul „+”. Apariția simbolului „+” în fereastra de rezultate poate varia; cu toate acestea, liniile care compun simbolul „+” și linia din fereastra de control trebuie să aibă grosimi comparabile (consultați imaginile A – C).
- Imagine A**
Acestă imagine prezintă un rezultat „Însărcinată”. Este mai probabil ca acest rezultat să apară când citiți testul înainte de ziua în care este așteptată menstruația, când nivelurile hCG sunt relativ scăzute.
- Imagine B**
Acest rezultat nu este neobișnuit când sunteți însărcinată și efectuați testul în apropierea zilei în care este așteptată menstruația, deoarece nivelurile hCG pot fi încă relativ scăzute.

IVD	Dispozitiv medical pentru diagnosticare in vitro	LOT	Cod lot		Nu reutilizați
	Limită de temperatură 2 °C – 30 °C		Data de expirare		Producător
					Consultați instrucțiunile de utilizare

Pentru pașii următori, informații și sfaturi de ordin general referitoare la sarcină, consultați site-ul nostru la:

www.clearblue.com

Acest dispozitiv este destinat utilizării la domiciliu. Păstrați la temperatura camerei.

Permiteți testului să ajungă la temperatura camerei timp de 30 minute înainte de efectuarea testului, dacă a fost păstrat la frigider.

Nu lăsați la îndemâna copiilor.

Doar pentru diagnosticare in vitro.

Aruncați împreună cu deșeurile menajere.

Nu utilizați dacă folia este deteriorată.

Nu utilizați un bețisor de test după data de expirare.

CE 0843

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Geneva, Elveția. Clearblue este o marcă comercială a SPD. Produs în China © 2015 SPD. Toate drepturile rezervate

Distribuit de: INTERBRANDS M&D, Șos. Vilor, Nr. 14, Sector 5, București, România. Tel: 021 336 2815.