

Test de sarcină Facil

- Acuratețe de peste 99% începând cu ziua estimată a menstruației.
- **Citiți cu atenție acest prospect înainte de a efectua o testare.**

1 Efectuați testul


Puteți efectua testarea în orice moment al zilei, începând cu ziua estimată a menstruației.

- Când sunteți pregătiți să efectuați testul, scoateți dispozitivul test din folie și îndepărtați capacul albastru. Utilizați dispozitivul test imediat.



2 Așteptați 2 minute

- O linie albastră în fereaștră de control indică faptul că testul a funcționat.
- Puteți citi rezultatul după 2 minute.
- **Nu citiți rezultatul până când nu apare linia albastră.**
- Dacă nu apare nicio linie albastră în fereaștră de control în decurs de **10 minute** testul nu a funcționat (consultați Întrebarea 9).

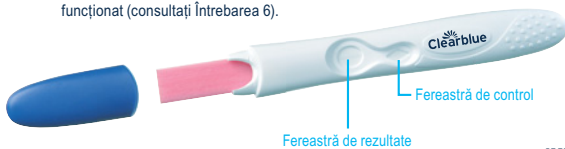

3 Citiți rezultatul

Acum puteți citi rezultatul în fereaștră de rezultate.



Dacă rezultatul este „Însărcinată”, consultați Întrebarea 9 din secțiunea Întrebări și răspunsuri.

Dacă rezultatul este „Absență sarcină”, consultați Întrebarea 10 din secțiunea Întrebări și răspunsuri.


Testați utilizând urina

Puteți efectua testul direct în jetul de urină sau într-o mostră de urină colectată într-un recipient curat și uscat.

- Țineți vârful cu modificare de culoare îndreptat în jos în jetul de urină sau în mostra de urină colectată, după cum se arată, timp de **doar 5 secunde**.
- Vârful cu modificare de culoare va deveni rapid roz, indicând faptul că urina este absorbită. **Trebuie să continuați să țineți vârful cu modificare de culoare în urină pe tot parcursul celor 5 secunde.**
- Țineți vârful cu modificare de culoare îndreptat în jos sau așezați bețișorul de test pe o suprafață plană până când se afișează linia în fereaștră de control.

Vă recomandăm să puneți la loc capacul.

Dacă vârful cu modificare de culoare nu devine complet roz, consultați Întrebarea 5.

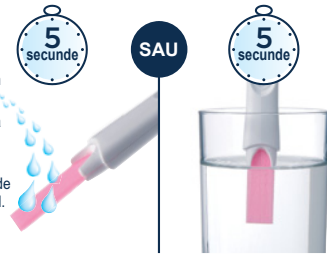

Nu contează dacă una dintre liniile din simbolul „+” este mai deschisă sau mai închisă decât cealaltă, rezultatul este „Însărcinată”:



Dacă nu sunteți convins de rezultat, consultați Întrebarea 7 pentru detalii complete.

Întrebări și răspunsuri

1 Ce exactitate are Clearblue?

Acest test garantează o exactitate de peste 99% în testele de laborator, utilizat începând cu ziua în care este așteptată menstruația.

2 Cum funcționează Clearblue?

Când sunteți însărcinată, organismul dvs. produce hormonul de sarcină hCG (Gonadotropină corionică umană). Cantitatea de hCG din organism crește în primele faze ale sarcinii. Acest test poate detecta cantități infime din acest hormon în urina dumneavoastră începând cu ziua în care este așteptată menstruația (sensibilitatea acestui test este de 25 mUI/ml).

3 Când pot efectua testul cu Clearblue Facil?

Puteți efectua testarea în orice moment al zilei, începând cu ziua estimată a menstruației. Pentru a stabili ziua în care este așteptată menstruația, calculați durata obișnuită a ciclului menstrual numărând de la prima zi a menstruației până la ziua de dinaintea menstruației următoare.

- Dacă aveți cicluri menstruale neregulate, permiteți trecerea celei mai lungi perioade de ciclu menstrual din lunile recente înainte de a efectua testul.
- Nu beți cantități mari de lichide înainte de efectuarea testului.
- Dacă rezultatul este „Absență sarcină” dar suspectați în continuare posibilitatea unei sarcini, consultați Întrebarea 10.

4 Este posibil ca vreun medicament sau afecțiune medicală să influențeze rezultatul?

- Înainte de realizarea testului, citiți întotdeauna instrucțiunile fabricantului pentru orice medicament pe care îl luați.
- Medicamentele pentru fertilitate care conțin hCG pot duce la rezultate echivoce (aceste medicamente pentru fertilitate sunt administrate de obicei injectabil și efectuarea testării prea curând după administrare poate determina un rezultat fals „Însărcinată”).
- Alte terapii pentru fertilitate (cum ar fi citratul de clomifen), analgezicele și contraceptivele hormonale (spre exemplu, pilula contraceptivă) nu ar trebui să afecțeze rezultatul.
- Dacă ați întrerupt recent utilizarea contraceptivelor hormonale sau utilizați tratamente pentru fertilitate cum ar fi citratul de clomifen, este posibil ca ciclurile menstruale să fie neregulate, determinându-vă astfel să efectuați testul prea devreme.
- Dacă ați fost însărcinată recent (chiar dacă nu ați dus sarcina la termen), este posibil să obțineți un rezultat „Însărcinată” incorect.
- Sarcina ectopică, chisturile ovariene, menopauza și câteva afecțiuni medicale foarte rare pot duce la rezultate echivoce.
- Dacă obțineți rezultatul „Însărcinată”, este posibil să descoperiți mai târziu că nu sunteți însărcinată datorită pierderii naturale a sarcinii, eveniment ce poate apărea în stadiile precoce.

În cazul în care obțineți rezultate neașteptate, trebuie să le discutați cu medicul dumneavoastră.

5 Am folosit testul, dar vârful cu modificare de culoare nu a devenit complet roz. Ce trebuie să fac?

Dacă vârful cu modificare de culoare nu a devenit complet roz, este posibil să nu fi aplicat suficientă urină. Cu toate acestea, dacă linia albastră apare în fereaștră de control în decurs de 10 minute de la efectuarea testului, atunci testul a funcționat. Dacă nu apare nicio linie albastră în fereaștră de control în decurs de 10 minute de la efectuarea testului, consultați Întrebarea 6.

6 Am utilizat testul, dar nu a apărut nicio linie albastră în fereaștră de control. Ce trebuie să fac?

Dacă nu apare nicio linie albastră în fereaștră de control în decurs de 10 minute de la efectuarea testului, atunci testul nu a funcționat. Acest lucru se poate întâmpla dacă: Vârful cu modificare de culoare nu a fost ținut îndreptat în jos sau bețișorul de test nu a fost așezat pe o suprafață plană după aplicarea urinei. A fost utilizată prea multă sau prea puțină urină. Trebuie să țineți în contact cu urina timp de 5 secunde. Trebuie să testați din nou, utilizând un test nou și având grijă să respectați instrucțiunile. Vă recomandăm să colectați o mostră de urină într-un recipient curat și uscat și să scufundați doar vârful cu modificare de culoare în urină, timp de doar 5 secunde.

7 Ce se întâmplă dacă sunt nesigură de rezultat?

- Pentru ca rezultatul să fie Însărcinată”, trebuie să apară o linie albastră în fereaștră de control și un simbol „+” în fereaștră rezultat, în 10 minute de la efectuarea testului.

Apariția simbolului „+” în fereaștră de rezultate poate varia; cu toate acestea, liniile care compun simbolul „+” și linia din fereaștră de control trebuie să aibă grosimi comparabile (consultați imaginile A – C).

Imagine A

Acest lucru este mai probabil să survină când sunteți însărcinată și efectuați testarea la mai mult de câteva zile de la ziua estimată a menstruației, când nivelul de hCG este mai ridicat.

Pentru autotestare la domiciliu. Exclusiv pentru diagnostic *in vitro*. Nu este destinat uzului intern. A nu se reutiliza. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra între 2° - 30°C Dacă a fost păstrată la frigider, înainte de testare lăsați-le să ajungă la temperatura camerei, timp de 30 de minute. A nu se utiliza în cazul în care ambalajul este deteriorat. A nu se utiliza după „data expirării”. Aruncați împreună cu gunoii menajer obișnuiți.

	Producător		A nu se reutiliza
	Cod lot		Dispozitiv medical pentru diagnostic <i>in vitro</i>
	Data expirării		Limită de temperatură 2°C - 30°C

Imagine B

Acest lucru nu este neobișnuit când sunteți însărcinată și efectuați testarea în ziua estimată a menstruației sau în apropierea acesteia, când nivelul de hCG este încă relativ scăzut.

Imagine C

Chiar și această imagine prezintă un rezultat „Însărcinată”. Dacă, în continuare, nu sunteți sigură de rezultat, trebuie să așteptați cel puțin 3 zile înainte de repetarea testului, având grijă să respectați instrucțiunile.

- Pentru ca rezultatul testului să fie „Absență sarcină”, în decurs de 10 minute de la efectuarea testului, în fereaștră de control trebuie să apară o linie albastră, iar în fereaștră de rezultate, simbolul „-”.
- Dacă rezultatul este „Absență sarcină” dar suspectați în continuare posibilitatea unei sarcini, consultați Întrebarea 10.

8 Cât timp durează rezultatul?

Rezultatul poate fi citit oricând, în decurs de 10 minute de la efectuarea testului. După 10 minute, nu luați în seamă modificările apărute în rezultat.

9 Testul spune că sunt „Însărcinată”. Ce trebuie să fac?

Dacă testul indică faptul că sunteți însărcinată, programați o întâlnire cu doctorul dumneavoastră, care vă poate sfătui ce este de făcut în continuare.

10 Testul meu arată rezultatul „Absență sarcină”. Ce trebuie să fac?

Este posibil să nu fiți însărcinată, să aveți un nivel al hormonului de sarcină insuficient de ridicat pentru a fi detectat sau să fi calculat greșit data la care are așteptată menstruația. Dacă menstruația a întârziat, repetați testul după 3 zile, dacă suspectați în continuare posibilitatea unei sarcini. Dacă rezultatul acestui test este „Absență sarcină” și încă nu s-a instalat menstruația, consultați medicul dumneavoastră.

www.clearblue.com

Pentru întrebări referitoare la produs, contactați Serviciul de asistență clienți la adresa de mai jos:

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Geneva, Elveția.
Clearblue este o marcă comercială a SPD.
© 2019 SPD. Toate drepturile rezervate.