

Test de sarcină Detectare rapidă

- Acuratețe de peste 99% începând cu ziua estimată a menstruației.
- **Citiți cu atenție acest prospect înainte de a efectua o testare.**

1 Înainte de a începe

Un ceas vă poate fi de ajutor în timpul testului. Puteți efectua testarea în orice moment al zilei, începând cu ziua estimată a menstruației.



2 Efectuați testul

Când sunteți pregătită să efectuați testul, scoateți ambalaj extern din folie și îndepărtați capacul. Utilizați dispozitivul test imediat.

Puteți efectua testul direct în jetul de urină sau într-o mostră de urină colectată într-un recipient curat și uscat.

- Tineți vârful cu modificare de culoare îndreptat în jos în jetul de urină sau în moștră de urină colectată, după cum se arată, timp de **5 secunde întregi**.
- Vârful cu modificare de culoare va deveni roz instantaneu, indicând faptul că se absoarbe urină. **Trebuie să continuați să țineți vârful cu modificare de culoare în urină pe tot parcursul celor 5 secunde.**



- Tineți vârful cu modificare de culoare îndreptat în jos sau așezați dispozitivul test pe o suprafață plană până când se afișează o linie albastră în fereastra de control.
- Vă recomandăm să puneți la loc capacul.
- Dacă vârful cu modificare de culoare nu devine complet roz, consultați Întrebarea 5.



3 Citiți rezultatul


Puteți citi rezultatul în fereastra de rezultate.

În fereastra de control, unde citiți rezultatul, trebuie să fie o linie albastră. Aceasta linie arată că testul a funcționat.

Un rezultat „Însărcinată” poate apărea în decurs de 1 minut, dacă efectuați testul începând cu ziua în care considerați menstruația ca fiind întârziată (prima zi după ziua estimată a menstruației).

Trebuie să așteptați să treacă toate cele 3 minute pentru a confirma un rezultat „Absență sarcină” (consultați Întrebarea 8). Dacă nu vedeți o linie albastră în fereastra de control, testul nu a funcționat (consultați Întrebarea 6).

ASTEPTAȚI 3 MINUTE. Pe măsură ce testul începe să funcționeze, veți vedea linia albastră sau liniile albastre începând să apară.

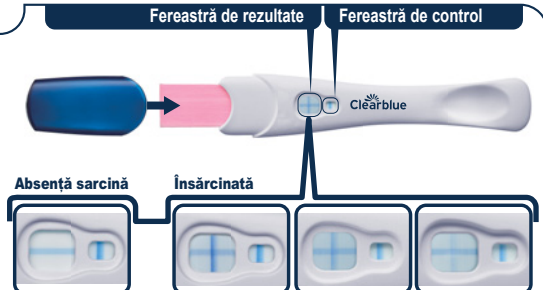

Absență sarcină
Dacă rezultatul obținut este „Absență sarcină” consultați Întrebarea 10.

Însărcinată
Imagine A
• Dacă rezultatul obținut este „Însărcinată”, consultați Întrebarea 11.

Imagine B
Imagine C
• Dacă nu sunteți convinsă de rezultat, consultați Întrebarea 7.

Nu contează dacă una dintre liniile care alcătuiesc simbolul „+” este mai deschisă sau mai închisă decât cealaltă; rezultatul este „Însărcinată”.

IMPORTANT! Citiți rezultatul în următoarele 10 minute de la efectuarea testării. După acest interval de timp, ignorați orice modificare a rezultatului obținut.

Întrebări și răspunsuri

- Ce excitante are Clearblue?**
Clearblue garantează o excitante de peste 99% în testele de laborator, utilizat începând cu ziua în care este așteptată menstruația.
- Cum funcționează Clearblue?**
Când sunteți însărcinată, organismul dvs. produce hormonul de sarcină hCG (Gonadotropina corionică umană). Cantitatea de hCG din organism crește în primele faze ale sarcinii. Testul de sarcină Clearblue Detectare rapidă poate detecta cantități infime ale acestui hormon în urina dvs. (sensibilitatea acestui test este de 25 mIU/ml).
- Când pot efectua testul cu Clearblue Detectare rapidă?**
Puteți efectua testul cu 5 zile înaintea ciclului menstrual întârziat, adică cu 4 zile înainte de ziua estimată a menstruației. Dacă efectuați testul înainte de ziua în care este așteptată menstruația și obțineți rezultatul „Absență sarcină”, există totuși posibilitatea să fiți însărcinată. Consultați diagrama de mai jos cu rezultatele testelor de laborator efectuate cu mostre recoltate în fazele timpurii ale sarcinii.

Testare anticipată

Număr de zile înainte de ziua estimată a menstruației	% mostrelor recoltate de la femei însărcinate al căror rezultat este „Însărcinată”
-1	98%
-2	97%
-3	88%
-4	56%

- Este posibil ca vreun medicament sau afecțiune medicală să influențeze rezultatul?**
• Înainte de realizarea testului, citiți întotdeauna instrucțiunile fabricantului pentru orice medicament pe care îl luați.
• Medicamentele pentru fertilitate care conțin hCG pot duce la rezultate echivoce (aceste medicamente pentru fertilitate sunt administrate de obicei injectabil și efectuarea testării prin curând după administrare poate determina un rezultat fals „Însărcinată”).
• Alte terapii pentru fertilitate (cum ar fi citratul de clomifen), analgezicele și contraceptivele hormonale (spre exemplu, pilula contraceptivă) nu ar trebui să afecțeze rezultatul.
• Dacă ați întrerupt recent utilizarea contraceptivelor hormonale sau utilizați tratamente pentru fertilitate cum ar fi citratul de clomifen, este posibil ca ciclurile menstruale să fie neregulate, determinându-vă astfel să efectuați testul prea devreme.
• Dacă ați fost însărcinată recent (chiar dacă nu ați dus sarcina la termen), este posibil să obțineți un rezultat „Însărcinată” incorect.
• Sarcina ectopică, chisturile ovariene, menopauza și câteva afecțiuni medicale foarte rare pot duce la rezultate echivoce.
• Dacă obțineți rezultatul „Însărcinată”, este posibil să descoperiți mai târziu că nu sunteți însărcinată datorită pierderii naturale a sarcinii, eveniment ce poate apărea în stadiile precoce.

În cazul în care obțineți rezultate neașteptate, trebuie să le discutați cu medicul dumneavoastră.

- Am folosit testul de sarcină, dar vârful cu modificare de culoare nu a devenit complet roz. Ce trebuie să fac?**
Dacă vârful cu modificare de culoare nu a devenit complet roz, este posibil să nu fi aplicat suficient urină. Cu toate acestea, dacă linia albastră apare în fereastra de control în decurs de 10 minute de la efectuarea testului, atunci testul a funcționat. Dacă nu apare nicio linie albastră în fereastra de control în decurs de 10 minute de la efectuarea testului, consultați Întrebarea 6.
- Am utilizat testul de sarcină, dar nu a apărut nicio linie albastră în fereastra de control. Ce trebuie să fac?**
Dacă nu apare nicio linie albastră în fereastra de control în decurs de 10 minute de la efectuarea testului, atunci testul nu a funcționat. Acest lucru se poate întâmpla dacă:
• Vârful cu modificare de culoare nu a fost ținut îndreptat în jos sau bețișorul de test nu a fost așezat pe o suprafață plană după aplicarea urinei.
• A fost utilizată prea multă sau prea puțină urină. **Trebuie să țineți în contact cu urina timp de 5 secunde.**
Trebuie să testați din nou, utilizând un test nou și având grijă să respectați instrucțiunile. Vă recomandăm să colectați o mostră de urină într-un recipient curat și uscat și să scufundați doar vârful cu modificare de culoare în urină, timp de 5 secunde.
- Ce se întâmplă dacă sunt nesigură de rezultat?**
• Pentru ca rezultatul să fie Însărcinată”, trebuie să apară o linie albastră în fereastra de control și un simbol „+” în fereastra rezultat, în 10 minute de la efectuarea testului.
Apariția simbolului „+” în fereastra de rezultate poate varia; cu toate acestea, liniile care compun simbolul „+” și linia din fereastra de control trebuie să aibă grosimi comparabile (consultați imaginile A - C).

Imagine A

Acest lucru este mai probabil să survină când sunteți însărcinată și efectuați testarea la mai mult de câteva zile după ciclul menstrual întârziat, când nivelul de hCG este mai ridicat.

Imagine B

Acest lucru nu este neobișnuit când sunteți însărcinată și efectuați testarea în ziua în care ciclul menstrual este întârziat sau în apropierea acesteia, când nivelul de hCG este încă relativ scăzut.

Imagine C

Chiar dacă este slab, totuși prezintă un rezultat Însărcinată. În cazul în care încă nu sunteți sigură de rezultat, trebuie să așteptați cel puțin 3 zile înainte de a reefectua testul, având grijă să respectați instrucțiunile.
• Pentru ca rezultatul testului să fie „Absență sarcină”, în decurs de 10 minute de la efectuarea testului în fereastra de control trebuie să apară o linie albastră, iar în fereastra de rezultate, simbolul „-” (minus). Dacă rezultatul este „Absență sarcină” dar suspectați în continuare posibilitatea unei sarcini, consultați Întrebarea 10.

- Când pot citi rezultatul?**
Un rezultat „Însărcinată” poate apărea în decurs de 1 minut, dacă efectuați testul începând cu ziua în care considerați menstruația ca fiind întârziată (prima zi după ziua estimată a menstruației). Asigurați-vă că în fereastra de control apare și o linie albastră înainte de a citi rezultatul. **Trebuie să așteptați 3 minute** pentru a confirma un rezultat „Absență sarcină”. Dacă nu apare nicio linie albastră în fereastra de control în decurs de 10 minute testul nu a funcționat (consultați Întrebarea 6).
- Cât timp durează rezultatul?**
Rezultatul poate fi citit oricând, după 3 minute și până la 10 minute de la efectuarea testului. După 10 minute, nu luați în seamă modificările apărute în rezultat.
- Testul meu arată rezultatul „Absență sarcină”. Ce trebuie să fac?**
Este posibil să nu fiți însărcinată, să aveți un nivel al hormonului de sarcină insuficient de ridicat pentru a fi detectat sau să fiți calculat greșit data la care era așteptată menstruația.
• Dacă ați efectuat testul mai devreme, testați din nou în ziua în care este așteptată menstruația.
• În cazul în care ziua în care ar trebui să se instaleze menstruația a trecut, repetați testarea peste 3 zile. Dacă rezultatul acestui test este „Absență sarcină” și încă nu s-a instalat menstruația, consultați medicul dumneavoastră.
- Testul spune că sunt „Însărcinată”. Ce trebuie să fac?**
Dacă testul indică faptul că sunteți însărcinată, programați o întâlnire cu doctorul dumneavoastră, care vă poate sfătuți ce este de făcut în continuare.

Pentru pași următori, informații și sfaturi de ordin general referitoare la sarcină, consultați site-ul nostru la: www.clearblue.com

Pentru autotestare la domiciliu. Exclusiv pentru diagnostic *in vitro*. Nu este destinat uzului intern. A nu se reutiliza. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra între 2° - 30°C. Dacă au fost păstrate la frigider, înainte de testare lăsați-le să ajungă la temperatura camerei, timp de 30 de minute. A nu se utiliza în cazul în care ambalajul este deteriorat. A nu se utiliza după „data expirării”. Aruncați împreună cu gunoiul menajer obișnuit.

	Producător		A nu se reutiliza
	Cod lot		Dispozitiv medical pentru diagnostic <i>in vitro</i>
	Data expirării		Limită de temperatură 2°C - 30°C

www.clearblue.com

Pentru întrebări referitoare la produs, contactați Serviciul de asistență clienți la adresa de mai jos:

Producător: SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Geneva, Elveția.
Clearblue este o marcă comercială a SPD.
© 2019 SPD. Toate drepturile rezervate.